

Most u jednoj posjeti

Ribbond mostovi u jednom tretmanu pružaju snagu, trajnost i estetiku. Napravite pripremu direktno u ustima; kao intermedijalan element upotrijebite prefabriciran zub ili zub izrađen od kompozita. Isplativost u samo jednom tretmanu!



Slučaj i slike Dr. Sema Belli

Primjena sa akrilatom

Ribbond zaustavlja napuknuća u provizornim mostovima, bite-ovima, mobilnim protezama, protetskim reparacijama itd. Ribbond kemijski prijanja i pojačava akrilat.



Slučaj
Annalan Labs

Iz arhiva
David Rudo, DDS

Slučaj
Dr. Tom Miller, DDS

Izrada Bataljaka

Oblik Ribbonda prilagođava se korijenskim kanalima i nije potrebno preparirati kanal nakon endodontskog tretmana. Nadogradnja Ribbondom poželjna je naročito gdje postoji mogućnost frakture korijena kao što se dešava kod ponovnih endodontskih liječenja, kod oslabljenih korijena. Vrhunska zamisao, sigurna za korijen!



Slučaj i slike Dr. David Hornbrook, DDS

Ortodontski Ritaineri

Ribbond retainer je optimalna alternativa orto žici jer se lako realizira, trajan je, estetski i ugodan. Jako rasprostranjen kod starijih pacijenata.



Iz arhiva Ribbond, Inc.

Poštovani kolega,

Uspjeh i usvajanje Ribbonda od strane tisuća stomatologa i stomatoloških fakulteta krenuvši od 1992.god., učinila ga je neophodnim elementom stomatoloških ordinacija u čitavom svijetu.

Ribbond nudi jednostavna rješenja koja su pouzdana, primjenjiva, trajna i privlačna.

Sigurno ste čuli nešto o Ribbond-u iz objavljenih ocjenjivanja, članaka, prijatelja, kolega. Sada isprobajte Ribbond i vidite što on može učiniti za Vas. Naše je osoblje širokog iskustva spremno odgovoriti na Vaša pitanja i primiti Vaše narudžbe. Srdačan pozdrav,

Dr. David N. Rudo, D.D.S.
Osnivač i Predsjednik
Ribbond, Inc.

Dr. David N. Rudo, D.D.S.
"Specijalisti za potporne trake"

Uporaba Ribbonda

- Parodontalni splintovi
- Mostovi u jednoj posjeti
- Nadogradnja bataljaka poslije endodoncije
- Indirektni mostovi u kompozitu
- Imobilizacija poslije trauma
- Ortodontski ritaineri
- Održavanje kod zatvaranja dijastema
- Tretman sindroma napuknutog zuba
- Provizorni mostovi
- Reparacije i rješavanje problema

Prednosti Ribbond trake

- Ribbond je omiljeni izbor trake za zubna pojačanja kliničkih i nezavisnih ocjenjivača u cijelom svijetu (izvor dostupan na upit)
- Otporan, nenadmašiva otpornost na lom
- Superioran način uporabe i rukovanja
- Ne petlja se, ne odvaja te ostaje u poziciji.
- Neograničena trajnost, u potpunosti iskoristiv, ekonomičan
- Siguran i biokompatibilan
- Učinkovitost dokazana dokumentiranim kliničkim rezultatima nakon 7 godina

 **Ribbond**[®]
bondable reinforcement ribbon
Uvoznik i generalni zastupnik za RH:



Ilic Dr. Riccardo d.o.o.

import export dental & general medical supplies

52223 Raša, Ulica Nikole Tesle 18

tel +(385) 52 874 452

www.ilic.hr info@ilic.hr


 **Ribbond**[®]
bondable reinforcement ribbon

Najbolja potporno/prijanjajuća traka za zubno pojačanje

Oduvijek, od strane svih nezavisnih istraživačkih instituta Ribbond prevenira mogućnost frakture kod svih radova - akrilatnih ili kompozitnih



www.ilic.hr

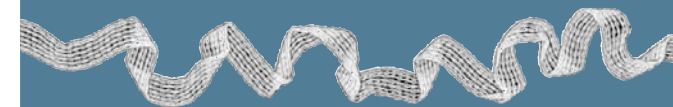

Što je Ribbond?

Ribbond je prijanjajuća traka za zubna pojačanja, učvršćuje se adhezivnim tehnikama, prevenira mogućnost fraktura kod radova u akrilatu ili kompozitu. Njegova originalna kombinacija patentiranog tkanja i prijanjajućih vlakana visoke snage rezultira sposobnošću onemogućavanja fraktura i zaustavljanju širenja pukotina zahvaljujući višesmjernom prijenosu sile što niti jedna druga traka za pojačanja nije u mogućnosti dostići. Savršena za široki spektar primjena u stomatologiji.

Patentirano Tkanje

Ribbond proizvod realiziran je koristeći dva patentirana tkanja. Materijali Ribbond, patentiranog tkanja sa zatvorenim petljama, stvaraju mrežu prepletenih vlakana koja zaustavljaju širenje pukotina, zahvaljujući višesmjernom prijenosu sile. Virtualno je lišen memorije, ne dijeli se ili petlja te nije elastičan prilikom rezanja ili adaptiranja.


Veličine Ribbonda

1 mm (Ortodontski)

2 mm

3 mm

4 mm

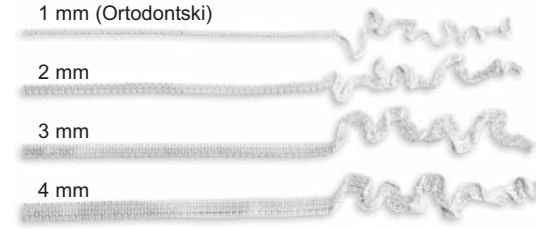

Prikazane Ribbond trake nisu u realnim dimenzijama

Ribbond Starter Kit



Parodontalni splintovi

Splintovi Ribbond su lake izvedbe, estetski, tanki i što je najvažnije, NE lome se. Trajni Ribbond splintovi su ekonomično isplativa rješenja, kako za Vas tako i za Vaše pacijente.



Zubi spremni za adheziju



Nanošenje kompozita na zube



Prijanjanje Ribbonda na kompozit



Nanošenje tekućeg kompozita na splint



Zgotovljen splint, (lingualno)



Zgotovljen splint, (okluzalno)

Slučaj i fotografije Prof Dr Howard E. Strassler, D.M.D.

Splintovi-Most sa prirodnim zubom

Koristite kliničku krunicu izvađenog zuba za direktnu realizaciju dugotrajnog provizornog mosta. Izvrsno za starije pacijente!



Iz arhiva Dr. David Rudo, D.D.S.

Ribbond Starter Kit sadržaj

Starter Kit sadržava 3 Ribbond trake (2mm, 3mm, 4mm), posebne škarice Ribbond od inox čelika te uputstvo za uporabu. Dostupni kao Ribbond Original, Ribbond THM i Ribbond Ultra. Svaki kit sadržava materijal dostatan za 18 parodontalnih splintova od kanina do kanina ili za cca 26 mostova sa tri elementa.

Jako Prijanjanje

Ribbond prijanja svim kompozitima i akrilatima. Pokusi izvlačenja vlakom pojedinačnih vlakana prikazuje adheziju između akrilata i vlakana Ribbond koji je tretiran plazmom.

Vrhunsko rukovanje

Ribbond proizvodi omiljeni su kod nezavisnih ocjenjivača zahvaljujući izvrsnoj mogućnosti rukovanja; vlakna su lišena memorije i ne otvaraju se kod namještanja a to Vam omogućuje lako namještanje trake u proksimalna područja zubi, brzo i podatno, u potpunosti umanjujući napor uz maksimalnu iskoristivost efekta laminacije.

Estetski, Biokompatibilan

Ribbond je proziran, bez boje i nestaje unutar kompozita ili akrilata. Različit od ostalih traka za pojačanja. Ribbond je u potpunosti biokompatibilan.

Vlakna Visoke Otpornosti

Ribbond je realiziran od istih vlakana polietilena visoke otpornosti, ultra povišene molekularne težine, korištenih u proizvodnji antiprojektilnih jakni. Ta su vlakna izuzetno čvrsta te zahtijevaju posebne škarice za rezanje koje su uključene u Starter Kitu.



RIBBOND



problemi kod ostalih traka

Neograničen rok trajanja

Ribbond ne zahtjeva čuvnje u hladnjaku i ima neograničen rok trajanja. Zahvaljujući tome u potpunosti je iskoristiv.

Priča o uspjehu, od 1992.god.

Uspjeh Ribbonda temelji se na njegovom stabilnom principu vlakno-kompozit (čvrst, ne lomi se), što dokazuju već nebrojeno objavljeni članci i studije. Dokumentirani rezultati predstavljaju dokumentiranu prednost Vašoj profesionalnoj praksi. Članci, studije i ocjenjivanja dostupne su na upit od strane proizvođača.

Trake za pojačanja Ribbond

Ribbond-Original

Predstavljen 1992.god., odmah postaje standard kod traka za pojačanja zahvaljujući svojoj jednostavnošću primjene i svojoj trajnosti.

Debljina trake 0.35 mm

Ribbond-THM

Tanji, sa povišenim modulom, proizvod koji je najrašireniji u primjeni. Ostvaren od izuzetno tankih vlakana omogućava izvođenje još tanjih i glađih radova baz narušavanja kapaciteta otpornosti same trake.

Debljina trake 0.18 mm

Ribbond Ultra

Predstavljen 2013.god. Izrađen od još tanjih vlakana, jači je te se još lakše adaptira.

Debljina trake 0.12 mm