

# Luxator LX

## Periotomo Meccanico Reciprocante

Con Luxator LX l'accesso è migliore ed i tessuti molli e l'osso sono ben preservati e lisci.

**DIRECTA**   
directadental.com

Il nuovo periotomo meccanico **Luxator LX** stabilisce un nuovo standard per le estrazioni atraumatiche offrendo miglioramenti di **sicurezza, precisione e accesso**.




### Punta durevole rivestita in nitruro di titanio

- Scorre con maggiore facilità nell'alveolo e resta affilata.
- **Reciprocante in direzione verticale** per un taglio sicuro delle fibre di Sharpey nel modo meno traumatico per il paziente.
- **Autodirezionante**. L'estremità del periotomo segue la superficie radicolare, riducendo il rischio di danni ossei.
- **Ottimo accesso ad aree impervie** Molari, linguali, distali.

CE



Utilizzo Clinico, Prof Loris Prosper

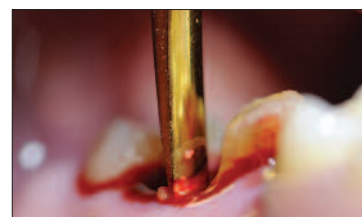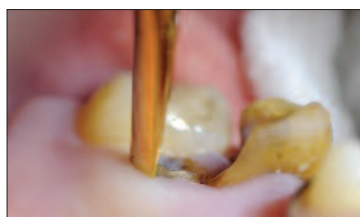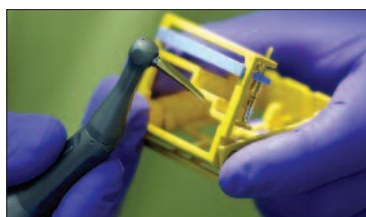

1. Inserire la punta del Periotomo nel manipolo.
2. Attivare il periotomo meccanico e lussare a bassa velocità (**2000 - 4000** giri / min.).
3. Lasciare che la punta del Periotomo lavori attorno al dente per tagliare le fibre parodontali. Premere con fermezza e seguire la superficie del dente.



4. Utilizzare un **Luxator Forte** per giudicare lo stato della lussazione. Se necessario proseguire con **Luxator LX**. Se la penetrazione fosse difficile, cercare un punto d'accesso con un **Periotomo Luxator**, quindi procedere con il lavoro di lussazione utilizzando **Luxator LX**.
5. Togliere il dente con una pinza tradizionale oppure con **Luxator RootPicker**.
6. Estrazione di successo con danno tissutale minimo.

### 40 73100 Luxator LX KIT

- 1 Manipolo
- 2 Punte rivestite in Nitruro di Titanio, chiavetta
- 1 contenitore per sterilizzazione

€ 890

40 73101 Luxator LX Punta Periotomo Corta **64,80**

40 73102 Luxator LX Punta Periotomo Lunga **64,80**

### Periotomo Meccanico Reciprocante **Luxator LX**

Può essere utilizzato con altri strumenti per l'estrazione quali quelli della linea **Luxator**



## Luxator®

### Molto meno traumatico per dentista e paziente

Gli strumenti **Luxator** costituiscono oggi il metodo preferito per eseguire estrazioni.

Gli strumenti per estrazioni **Luxator** sono stati pensati e progettati da un odontoiatra svedese per rendere l'estrazione meno traumatica possibile.

Questi strumenti sono caratterizzati da un livello di dettaglio e di precisione che solo il professionista è in grado di apprezzare.

Grazie alle caratteristiche tecniche ed al design ergonomico gli strumenti **Luxator** si distinguono fra tutti.



I **periotomi Luxator** sono specificamente studiati per recidere il legamento parodontale e sono dotati di una sottile lama rastremata che comprime l'alveolo, reseca la membrana e rimuove senza traumi l'elemento dentario dalla propria sede. L'intero intervento viene effettuato con minimo danno ai tessuti.

Le leve **Luxator Forte** sono dotate di una punta rafforzata, che permette di esercitare maggiore forza mantenendo il senso tattile.

## Luxator® Periotomi Short

Una versione del periotomo Luxator provvista di stelo di 10 mm più corto. Favorisce una corretta posizione di lavoro al professionista con mani più piccole.

## Luxator® Periotomo 3S Titanium

Il periotomo Luxator 3S è disponibile anche in acciaio inox rivestito in nitruro di titanio per un'aumentata durezza. L'estrazione viene eseguita riducendo al minimo il danno tissutale. La punta durevole rivestita in titanio scorre con maggiore facilità nell'alveolo e non richiede affilatura.


L-1S Periotomo e bisturi parad.	L-2S Periotomo	S-2S Periotomo	L-3C Periotomo	S-3C Periotomo	L-3S Periotomo	L-3T Periotomo	S-3S Periotomo
1 mm Diritto Standard	2 mm Diritto Standard	2 mm Diritto Corto	3 mm Curvato Standard	3 mm Curvato Corto	3 mm Diritto Standard	3 mm Diritto L Titanio	3 mm Diritto Corto
	Uso: Apicale e/o interprossimale		Uso: Generale / inizio			Uso: Interprossimale	




Minimo danno ai tessuti.




Manico ergonomico

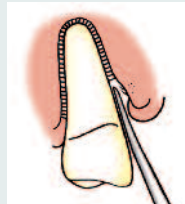

Comprime l'alveolo

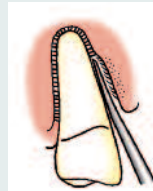


Recide i legamenti.

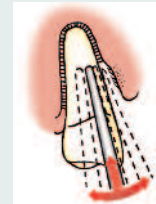

Estrazione

**33 541K30** Luxator Kit Periotomi LK4, L3C, L3S, L5C, L5S, affilatore L10 4 pz.  
**€ 295,00**

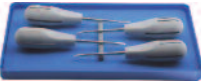

**33 541K31** Luxator Kit LK7 L2S, L3C, L3S, L3CA, L3IC, L5C, L5S, affilatore L10 7 pz. **€ 498,00**




**33 541K32** Luxator Kit VET L1S, L2S, L3C, L3S, L3CA, affilatore L10 5 pz.  
**€ 347,00**

**33 541K33** Luxator Short Kit SK4 S3C, S2S, S3S, S3CA, affilatore L10 4 pz.  
**€ 295,00**

**Luxator® Strumento per affilare**

**33 5419L1** Pietra per affilare Luxator **€ 26,00**

L-3CA Periotomo		S-3CA Periotomo		L-3IC Periotomo	L-5C Periotomo	L-5S Periotomo	S-5S Periotomo
3 mm Contrangolato Standard		3 mm Contrangolato Corto		3 mm Inverso Standard	5 mm Curvato Standard	5 mm Dritto Standard	5 mm Dritto Corto
Uso: <b>Linguale</b> e/o distale - <b>Molari</b>				Uso: <b>Generale</b> , linguale e/o distale	Uso: <b>Radici molari grandi</b> - generale	Uso: <b>Interprossimale</b>	

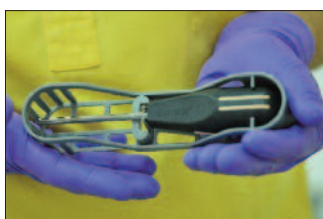

## Fixus 1

Protegge il Luxator durante la pulizia, la sterilizzazione e lo stoccaggio.

Contenitore autoclavabile ideale per riporre il Luxator tra un trattamento e l'altro. Estende la vita del Luxator proteggendolo durante la pulizia. Sicuro ed igienico.



**"Incluso in tutte le confezioni Luxator"**

55 53201 Cassetta Fixus 1 € 15,00

## Fixus 6

Organizza e protegge gli strumenti Luxator.

Autoclavabile, contiene fino a 6 strumenti.

Un morsetto tiene fermi gli strumenti. Estende la vita dei Luxator proteggendoli durante la pulizia. Sicuro ed igienico.



55 53206 Cassetta Fixus 6 € 74,00

## Luxator® Periotomi Dual Edge

Punta innovativa a doppia funzione

Punta innovativa a doppia funzione per sondare e lussare. Funzioni integrate di periotomo e lussatore. Inserimento graduale più sicuro, riduce il rischio di scivolamento. Ideale per denti fratturati in profondità e radici cariate.

## Luxator® Forte Leve

Forti ed ergonomiche

Uno strumento eccellente dalla punta rinforzata che consente lo scollamento di denti e radici senza rischio di danneggiarne la punta. La sensibilità rimane inalterata. Sostituisce scollatori meno ergonomici.



**DE3**  
Dual Edge  
3/1.5 mm  
Diritto Standard

**DE5**  
Dual Edge  
5/3 mm  
Diritto Standard

**F25**  
Forte  
2.5 mm  
Diritto Standard









**F32**  
Forte  
3.25 mm  
Diritto Standard

**F40**  
Forte  
4 mm  
Diritto Standard








## Luxator® Periotomi forniti con un contenitore Fixus 1

### LUXATOR Periotomi - manico grigio chiaro

Codice	Rif.	Modello	Colore	Lama	Uso consigliato	Prezzo	
<b>33 5411S</b>	<b>L-1S</b>	Lama dritta	Verde chiaro	1 mm	Incisivi*	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 5412S</b>	<b>L-2S</b>	Lama dritta	Verde	2 mm	Apicale e/o interprossimale	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 5413C</b>	<b>L-3C</b>	Lama curva	Nero	3 mm	Uso generale /inizio	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 5413S</b>	<b>L-3S</b>	Lama dritta	Grigio	3 mm	Interprossimale	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 5413CA</b>	<b>L-3CA</b>	Contrangolo	Blu	3 mm	Linguale e/o distale - Molari	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 5413IC</b>	<b>L-3IC</b>	Curvo Inverso	Blu chiaro	3 mm	Generale, linguale e/o distale	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 54135C</b>	<b>L-5C</b>	Lama curva	Marrone scuro	5 mm	Radici molari grandi - generale	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 54135S</b>	<b>L-5S</b>	Lama diritta	Marrone chiaro	5 mm	Interprossimale	<b>€ 98,00</b>	

\*Estremamente affilato e delicato, usare con attenzione! / Periotomo e/o bisturi parodontale.



### LUXATOR Periotomi Short - manico azzurro, stelo 10 mm più corto dei Luxator

Codice	Rif.	Modello	Colore	Lama	Uso consigliato	Prezzo	
<b>33 541S2S</b>	<b>S-2S</b>	Lama dritta	Verde	2 mm	Apicale e/o interprossimale	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 541S3C</b>	<b>S-3C</b>	Lama curva	Nero	3 mm	Uso generale /inizio	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 541S3S</b>	<b>S-3S</b>	Lama dritta	Grigio	3 mm	Interprossimale	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 541S3CA</b>	<b>S-3CA</b>	Contrangolo	Blu	3 mm	Linguale e/o distale - Molari	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 541S5S</b>	<b>S-5S</b>	Lama dritta	Marrone chiaro	5 mm	Interprossimale	<b>€ 98,00</b>	

### LUXATOR Periotomo Titanio - manico bianco




<b>33 541S3ST</b>	<b>L-3ST</b>	Lama dritta	Blu	3 mm	Interprossimale	<b>€ 119,00</b>	
-------------------	--------------	-------------	-----	------	-----------------	-----------------	--

### LUXATOR Periotomi Dual Edge - manico verde chiaro

Codice	Rif.	Modello	Colore	Lama	Uso consigliato	Prezzo	
<b>33 541DE3</b>	<b>DE3</b>	Lama dritta	Grigio	3 / 1,5 mm	Denti fratturati e radici cariate <sup>1</sup>	<b>€ 98,00</b>	
<b>33 541DE5</b>	<b>DE5</b>	Lama dritta	Marrone	5 / 3 mm	Denti fratturati e radici cariate <sup>2</sup>	<b>€ 98,00</b>	

1. Estremamente affilato e delicato, usare con attenzione! Periotomo e/o bisturi parodontale. 2. Quando sono necessarie forze più elevate.

### LUXATOR Forte Elevator - manico nero

Codice	Rif.	Modello	Colore	Lama	Uso consigliato	Prezzo	
<b>33 541F25</b>	<b>F25</b>	Lama dritta	Verde	2,50 mm	Scollamento iniziale	<b>€ 87,00</b>	
<b>33 541F32</b>	<b>F32</b>	Lama curva	Grigio	3,25 mm	Scollamento intermedio	<b>€ 87,00</b>	
<b>33 541F40</b>	<b>F40</b>	Lama dritta	Marrone scuro	4,00 mm	Scollamento fase finale	<b>€ 87,00</b>	

## Luxator RootPicker

Utile nelle estrazioni più problematiche per rimuovere radici, residui di radici o frammenti di denti.





Durante l'estrazione residui di radici possono restare fermamente alloggiati nel legamento parodontale. Questi, così come eventuali frammenti del dente da estrarre sono spesso molto piccoli e scivolosi, difficili da rimuovere con una normale pinzetta. In tali situazioni è importante usare uno strumento dalle proprietà adeguate per completare con successo l'estrazione.

Luxator RootPicker è uno strumento corto e stabile che entra facilmente nell'alveolo.

La punta dello strumento afferra saldamente gli elementi restanti che in questo modo vengono estratti o rimossi in modo sicuro.

Disponibile nelle versioni con punta dritta e angolata.

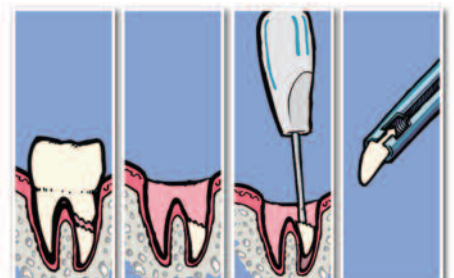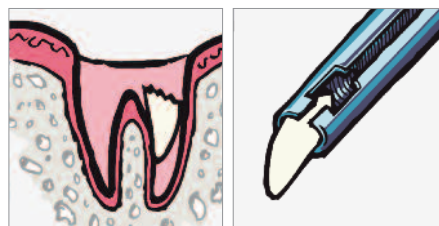

- 33 3419RPS** Luxator Root Picker - Pinzetta per frammenti RPTI DRITTA **€ 66,00**  
**33 3419RPC** Luxator Root Picker - Pinzetta per frammenti RPTI CURVA **€ 66,00**

